

Návod na odběr buněk dutiny ústní odběrovým kartáčkem (bukální stěr)


Pes musí mít čistou ústní dutinu a neměl by min. 1 hodinu před odběrem jíst a pít.

Pokud jsou štěňata ještě kojená, prosíme, provádějte odběr vzorků min. 1 hodinu po kojení, tak aby nedošlo ke kontaminaci buňkami matky. Štěňata by také měla být po tuto dobu v omezeném kontaktu s matkou a ostatními sourozenci.

1. Otevřete stříbrné balení s odběrovou soupravou a vytáhněte tubu s kartáčkem.




2. Vyjměte odběrový kartáček z tuby. Dbejte, abyste se prsty nedotkli odběrové části kartáčku (obr. 1).

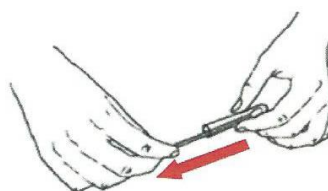

obr. 1

3. Vložte kartáček do ústní dutiny psa a stírejte nejméně 10 sekund vnitřní část jeho ústní dutiny. Při odběru užívejte stálého tlaku a otáčejte kartáčkem. **Snažte se setřít co největší plochu ústní dutiny (obr. 2).**

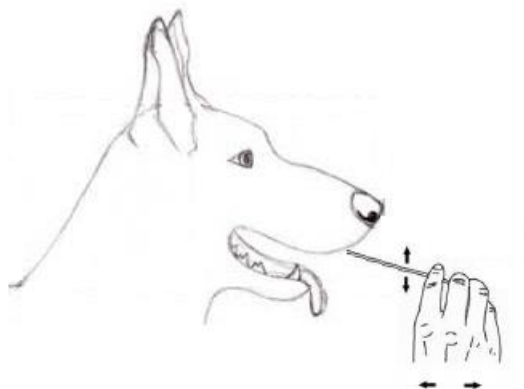

obr.2

4. **Po odběru nechte kartáček vyschnout min. jednu hodinu při pokojové teplotě**
5. Kartáček vraťte zpět do tuby. Popište zkumavku jménem psa. Vyplňte žádanku a tu se zkumavkou odešlete do 14 dnů v bublinkové obálce do laboratoře.